

Pflegeempfehlung GeskaMed® Lagerungshilfen CarePlus

Bezug: PU / 100% Polyester mit 100% Polyurethan-Beschichtung
Füllmaterial: EPS-fill BASIC

ALLGEMEIN

PFLEGE

- **Wir empfehlen bei der Produktpflege die WISCHDESINFEKTION!**
Leicht zu reinigen mit Seifenwasser oder handelsüblichen Desinfektionsmitteln
(Bitte beachten Sie die Angaben des Herstellers zu Konzentration und Einwirkzeit)

TROCKNUNG

- Trocknen im Tumbler wird nicht empfohlen. Material kann bei zu hohen Temperaturen an der Trommel kleben bleiben!

WICHTIG FÜR GROSSWÄSCHEREIEN / KLINIKWÄSCHE

- für die industrielle Wäsche nicht geeignet!

Pflegeanleitung laut Produktetikett:



Falls trotzdem ein Waschgang nötig ist, beachten Sie bitte folgendes:

WASCHPROZESS – in der Haushaltsmaschine

- Sortierung der Wäsche, Kissen separat getrennt von anderer Wäsche waschen
 - Kissen im Wäsche-/Textilbeutel waschen und trocknen
 - Maschine nicht überladen, die Kissen müssen sich in der Trommel bewegen können
 - Waschtemperatur 60°C – 95°C
 - Schonwaschgang wählen
 - Schleudern bei niedriger Drehzahl
 - Materialschonendes chlorfreies Waschmittel verwenden
 - Waschmittelmenge reduzieren, 1/3 der üblichen Menge reicht aus
 - Keinen Weichspüler verwenden
-